

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/plaster-steri-strip-6mmx38mm-przyspiesza-gojenie-zmniejsza-ryzyko-zakazenia-p-1560.html>



## Plaster Steri Strip 6mmx38mm - przyspiesza gojenie, zmniejsza ryzyko zakażenia

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>7,95 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>7,36 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>1560</b>             |
| Kod EAN          | <b>0100707387062514</b> |
| Producent        | <b>Boxmet</b>           |

### Opis produktu

Plaster Steri Strip 6mmx38mm, szew do zamykania ran

Plastry Steri Strip służą do samodzielnego opatrywania drobnych skaleczeń i niewielkich ran. Plastry ściągające rany ograniczają konieczność szycia skaleczeń, przyspieszają gojenie i zmniejszają ryzyko wystąpienia infekcji. Prezentowane plastry zbliżniające są skuteczniejsze niż ich tradycyjne odpowiedniki.

#### Plastry ściągające rany - nieinwazyjna alternatywa lub wsparcie dla szwów

W przypadku zastosowania plastrów do zamykania ran urazowych i pooperacyjnych, mogą zostać użyte samodzielnie lub razem ze szwami konwencjonalnymi albo klamerkowymi, jak również służyć do wzmocnienia gojącej rany już po usunięciu szwów. Plastry zbliżniające zostały wykonane z porowatego podłoża włókninowego, które pokryto hipoalergicznym klejem i dodatkowo wzmocniono włóknami syntetycznego jedwabiu.

#### Plastry ściągające rany Steri Strip - najważniejsze cechy

Plastry ściągające Steri Strip są bezpieczne, łatwe w użyciu, całkowicie nieinwazyjne i antyalergiczne, a odsetek zakażeń po ich zastosowaniu jest bardzo niski. Nie każda rana wymaga ingerencji igły – czasami uszkodzenia są niewielkie, ale brak jakiegokolwiek reakcji może skutkować nieestetycznymi bliznami. W takich sytuacjach paski Steri Strip radzą sobie doskonale – zamykają ranę i minimalizują ryzyko wystąpienia blizn. Plastry ściągające rany to niezwykle skuteczny produkt, który warto mieć przy sobie – zarówno w domowej apteczce (w końcu w kuchni nietrudno o skaleczenia), jak i w apteczce turystycznej, np. podczas górskich wędrówek.

#### Jak należy stosować Plastry Steri Strip

Stosowanie plastrów ściągających rany Steri Strip jest bardzo proste i intuicyjne. Zanim jednak przystąpisz do opatrywania rany, pamiętaj o kilku ważnych szczegółach:

- przed naklejeniem pasków skóra powinna być czysta, sucha i odtłuszczona,
- skórę trzeba oczyścić przynajmniej w promieniu 5 cm od brzegów rany,
- opakowanie otworzyć przez odciągnięcie wolnych brzegów, zagiąć brzeg wewnętrznego opakowania wzdłuż perforowanego brzegu i oderwać krawędź,
- wyjmować paski pod kątem 45 stopni do opakowania,
- nie należy naklejać pasków pod naprężeniem,
- zbliżyć do siebie oba brzegi rany używając palców lub pęsety,
- zamocować pierwszy pasek pośrodku rany, najpierw po jednej stronie, a następnie po drugiej,
- przy większych ranach podzielić rany na sektory, co redukuje naprężenie pasków i ułatwia zbliżenie brzegów rany,

- paski powinny być rozmieszczone w niewielkich odstępach od siebie (ok. 3 mm), aby umożliwić odpowiedni drenaż,
- jeśli brzegi rany zachodzą na siebie pod pierwszym lub paru pierwszych paskach należy je usunąć i zastąpić nowymi,
- zamocować dodatkowe paski równolegle do brzegów rany (ok. 1,25 cm od cięcia) tworząc układ przypominający drabinę w celu bardziej równomiernego rozkładu naprężeń.

**Przeciwwskazania do używania plastrów Steri Strip:**

Plastry ściągające rany Steri Strip są uniwersalne i przydatne w wielu sytuacjach, jednak nie należy używać ich:

- do zamykania ran zainfekowanych,
- w sytuacjach, w których właściwe zamocowanie jest trudne do wykonania, tłusta nadmiernie owłosiona skóra, wilgotna skóra.

Plastry ściągające rany – niezbędny w każdej apteczce

