

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/positube-zestaw-kontrolny-do-prawidlowej-intubacji-p-647.html>

POSITUBE - zestaw kontrolny do prawidłowej intubacji

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

647

Producent

MDL

Opis produktu

POSITUBE zestaw kontrolny do prawidłowej intubacji

Zestaw kontrolny do intubacji POSITUBE, został zaprojektowany i opatentowany przez zespół paramedyków, którzy poszukiwali szybkiej oraz pewnej i skutecznej metody intubacji. Pożądany efekt został uzyskany poprzez wyposażenie uchwytu do rurek intubacyjnych w możliwość natychmiastowej kontroli ich właściwego usytuowania. Przygotowany w taki sposób zestaw kontrolny POSITUBE nie rozprasza uwagi w trakcie przebiegu zabiegu, nie posiada też ograniczeń, które charakteryzują inne urządzenia do intubacji.

Zestaw kontrolny do intubacji POSITUBE - dlaczego warto stosować

Prezentowany zestaw jest bardzo prosty w użytkowaniu, gdyż wystarczy przyłączyć POSITUBE do założonej rurki intubacyjnej, a następnie pociągnąć za tłoczek. Pojawienie się oporu oznacza, że rurka znajduje się w przełyku. Natomiast, gdy rurka założona jest prawidłowo nie pojawi się opór. Dzięki sztywności tchawicy możliwy jest przepływ powietrza.